




H1 pulzusmérő

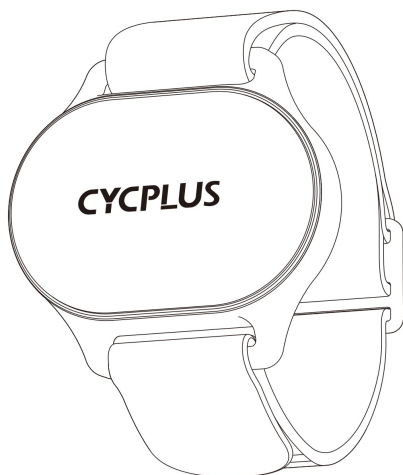

Felhasználói kézikönyv


Első lépések útmutató

Fárasztó



Javasoljuk, hogy a készüléket a bicepszén vagy az alkarán, illetve bármelyik kezén viselje. Rögzítse a szíjat, és állítsa be úgy, hogy szorosan illeszkedjen és a helyén maradjon tevékenység közben. A pontosabb adatok érdekében állítsa be a szíj legjobb pozícióját és hosszát. **Megjegyzés: A megfelelő működéshez szorosan illeszkedjen a bőrére.**

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét

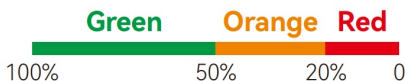

Kikapcsolt állapotban érintse meg a gombot, és a jelzőfény 2 másodpercig világít, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Bekapcsolás

Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy felvette a pulzuszmérőt. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Bekapcsoláskor a jelzőfény körülbelül 5 másodpercig felváltva pirosan és zölden villog, miközben elemzi és kiszámítja az aktuális pulzusszámot. Ezt a kezdeti fázist követően a készülék normál működésre vált. Amíg a pulzuszmérő működik, a jelzőfény a pulzusszámmal megegyező frekvencián villog, és a színe a pulzusszám értékétől függően változik.

Zöld fény: pulzusszám ≤ 80 BPM

Narancssárga fény: $80 \text{ BPM} \leq \text{pulzusszám} \leq 140 \text{ BPM}$

Piros fény: pulzusszám $\geq 140 \text{ BPM}$

Leállítás

A pulzusmérő automatikusan kikapcsol, miután eltávolították a bőrről, és 5 percig tétlenül hagyták, vagy kikapcsolhatja a gomb rövid megnyomásával. A jelzőfény a kikapcsolás után kialszik.

Töltés

A készülék mágneses töltőfelületet használ, és a jelzőfény töltés közben lassan pirosan villog, feltöltött állapotban pedig folyamatosan zölden világít. **Töltés közben kerülje a fémtárgyakat, és töltés után időben húzza ki a csatlakozót.**


Megjegyzések

1. A pulzusmérő nem helyettesíti az orvosi eszközöket.
2. Hideg környezetben a csökkent véráramlás befolyásolhatja a pontosságot. Viseljen meleg ruházatot a monitor alatt, és használat előtt melegedjen be.
3. Az izzadság vagy a szennyeződés zavarhatja az érzékelőt. Törölje át és helyezze át a monitort, ha szükséges.
4. A tetoválások, hegek, sötét bőr vagy túlzott szőrzet eltakarhatja az érzékelőt, ami befolyásolhatja az adatok pontosságát.

Specifikációk

Méret	43 × 44 × 12 mm
Súly	13 g
Vízálló	IPX6
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és 60 °C között
Akkumulátor	3,7 V 90 mAh
Töltési mód	5 V-os mágneses
Töltési idő	30 perc
Akkumulátor élettartama	Akár 110 óra (Környezeti és személyes tényezőktől függ.)
Vezeték nélküli protokoll	ANT+, BLE

Csomaglista

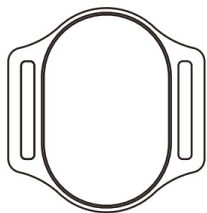


Pulzusmérő



Szíj




Töltőkábel

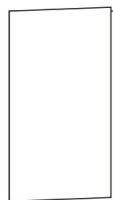

Kézikönyv

A heveder felszerelése

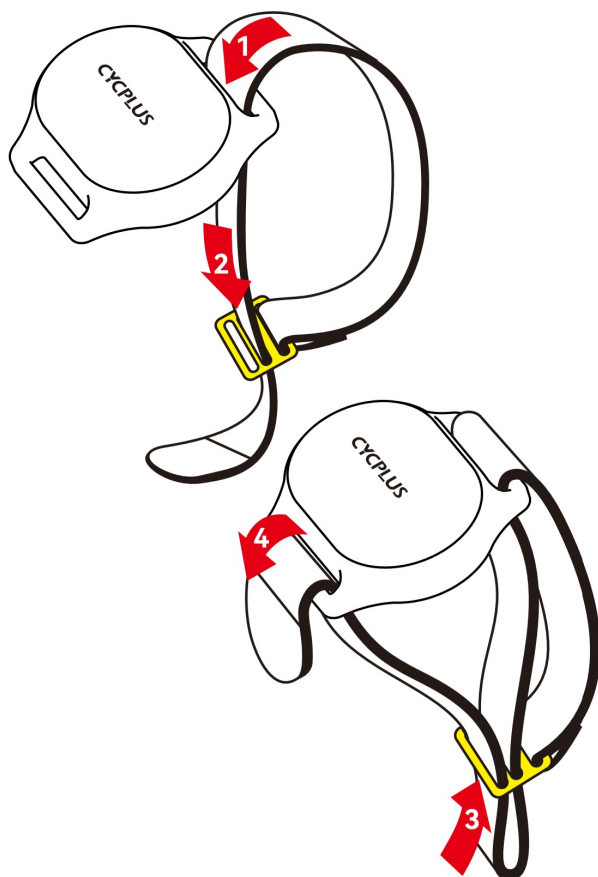

Termékoptimalizálási közlemény

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék kialakításán, funkcióin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Köszönjük megértését és támogatását!

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!